

14. インフォメーション

清掃と滅菌

1. インスツルメント

カムログインプラントシステムの器具類は滅菌されていません(特別に明記されている場合を除く)。
初回そして患者さんに使用前には必ず、清掃・消毒・滅菌を行ってください。

2. 補綴部品

カムログインプラントシステムの補綴部品は滅菌されていません(特別に明記されている場合を除く)。

それらは必ず単回にて使用してください。初回そして患者さんに使用前には必ず、清掃・消毒・滅菌を行ってください。

例外：トランスファーキャップやバイトレジストレーションキャップは滅菌できません。