

11. 咬合採得

システム構成

クローズドトレー法で使用するインプレッションポストは咬合採得の際にも必要です。(クローズドトレー法P141 参照) バイトレジストレーションキャップはカラーコード化されていますので、各径に該当するものを印象ポストに装着します。キャップは適合時、パチンとロックされますので正しく装着されていることが確認できます。キャップ装着によってバイトにシャープにエッジが付くことを防止できます。咬合採得には通常の材料を使用してください。キャップをバイト側に付着させたままではなく、別に添えてインプレッションポストとともに技工所へ送付します。



インプレッションポスト クローズドトレー用

スペースがない場合や、咬合高径が小さく咬合採得ができない場合には6mmのジンジバフォーマーで代用できます。

注意！

ジンジバフォーマーで咬合採得した場合は、ジンジバフォーマーの直径・部位・高さを指示書に記録し、該当するジンジバフォーマーを技工所に送付ください。

印象・咬合採得に使用した全ての部品は単回使用の製品です。精度が落ちるため、再使用はしないでください。

