

カムログインプラントシステム システムオーバービュー



カムログインプラントシステム

カムログスクリーインプラント

カムログスクリーインプラントは、ストレートテーパ形状のセルフタッピングで、プロモート（インプラントネック部の機械研磨面が1.4mm）とプロモートプラス（インプラントネック部の機械研磨面が0.4mm）の2種類がラインナップされています。

どちらのタイプでも、フィクスチャ内部の形態はチューブインチューブで、プラットフォームスイッチングの選択を可能にするスクエアのグルーブが付与されています。

スクリーインプラントは挿入用にインサーションポストが装着された状態で滅菌包装されており、直径に合わせてカラーコード化されています。

長さ φ	9 mm	11 mm	13 mm	16 mm
3.3 mm		✓	✓	✓
3.8 mm	✓	✓	✓	✓
4.3 mm	✓	✓	✓	✓
5.0 mm	✓	✓	✓	✓
6.0 mm	✓	✓	✓	✓



プロモートプラス プロモート

スクリーインプラント



プログレッシブライン

プログレッシブラインインプラント

カムログプログレッシブラインインプラント

カムログプログレッシブラインインプラントには、右記の表のようなサイズがラインナップされています。

上顎および下顎の骨に外科的に埋入され、部分欠損および無歯顎患者の機能的および審美的補綴修復のアンカーとして機能します。補綴修復コンポーネントはカムログインプラントシステムの補綴コンポーネントと互換性があります。カムログプログレッシブラインインプラントは、高い初期安定性を必要とする修復に適しています。


インプラントの形状は、高い初期安定性が得られるように設計されています。

プロモートプラスサーフェスにより、埋入深度は歯槽骨頂より0.4mm上方に出るようにするか、あるいは歯槽骨頂と同じ高さにすることができます。

長さ φ	9 mm	11 mm	13 mm	16 mm
3.3 mm		✓	✓	✓
3.8 mm	✓	✓	✓	✓
4.3 mm	✓	✓	✓	✓
5.0 mm	✓	✓	✓	✓

プラットフォームスイッチング PS用 (オプション) のアバットメント

プラットフォームスイッチングのオプションは審美領域における軟・硬組織をサポートするために選択されます。インプラントのプラットフォーム部の直径に比べてPS用アバットメント基部が小さくなっているため、インプラントのプラットフォーム上でインプラントとアバットメントの接合面がインプラントの中心方向へシフトされます。

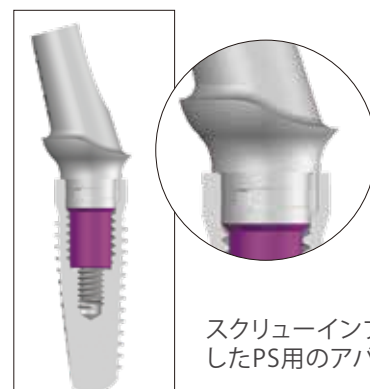

スクリーインプラントに装着したPS用のアバットメント

模型の作製


クローズドトレイ用

印象採得後、トランスファーキャップが印象内に取り込まれます。クローズドトレイ用のインプレッションポストをインプラントアナログに装着します。ヘックススクリールドライバーを使用して固定スクリューを手締めします。



トランスファーキャップ内にインプレッションポストをトランスファーキャップのガイド溝に正しくかみ合っていることを確認しながら戻します。この際、接着剤は絶対に使用しないでください。


印象を用いて石膏模型を作製します。その際インプレッションポストの固定スクリューは緩めないでください。石膏が硬化後、印象を取り外してインプラントアナログからインプレッションポストの固定スクリューを取り外してください。

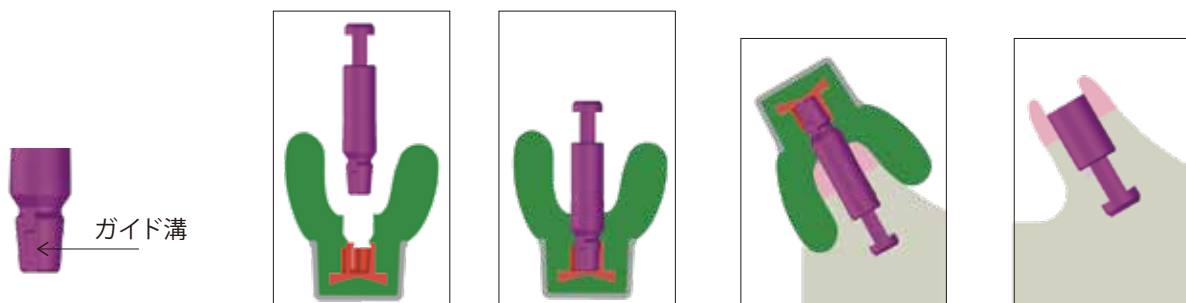

オープントレイ用

印象採得後、オープントレイ用インプレッションポストを印象に残したままにします。オープントレイ用インプレッションポストをインプラントアナログに装着します。そして、ヘックススクリールドライバーを使用して固定スクリューを手締めします。

印象を用いて石膏模型を作製します。石膏が硬化後、インプラントアナログからインプレッションポストの固定スクリューを取り外し印象を取り外します。

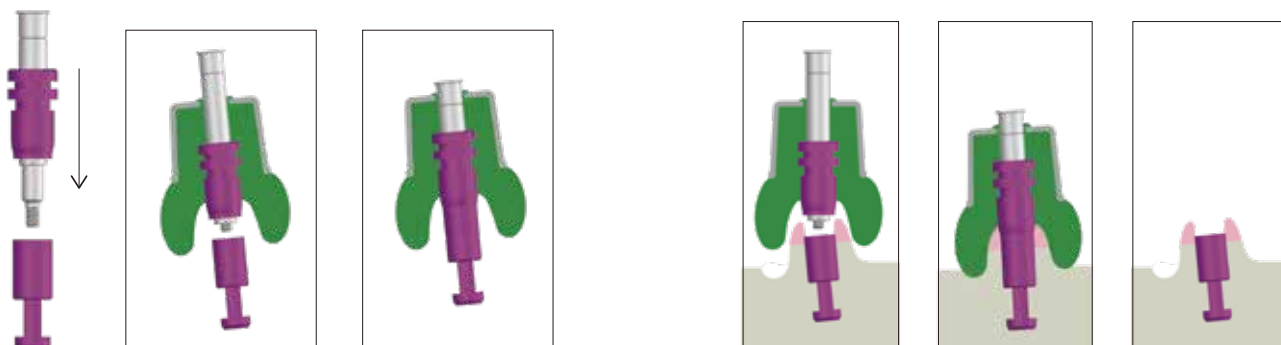

カムログアバットメント	医療機器承認番号【高度】	21200BZY00583000
カムログインプラント K-シリーズ	医療機器承認番号【高度】	22200BZX00868000
UCLAアバットメント K-シリーズ	医療機器承認番号【高度】	22600BZX00071000
カムログアバットメント ロケーター	医療機器承認番号【高度】	22700BZX00379000
カムログチタンテンポラリーアバットメント	医療機器承認番号【高度】	22800BZX00242000
カムログスクリューインプラント	医療機器承認番号【高度】	22800BZX00286000
カムログ COMFOUR アバットメント	医療機器承認番号【高度】	23000BZX00079000
カムログインプラント プログレッシブライン	医療機器承認番号【高度】	30100BZX00215000
カムログアバットメント K-シリーズ	医療機器承認番号【高度】	30200BZX00071000
カムログ インプラント補綴用器具	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000026
バイトレジストレーションポストショート キャップ付	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000065
印象用キャップ	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000067
ブリッジ用アバットメント印象ポスト	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000068
インプレッションポスト	医療機器届出番号【一般】	27B1X00 027000069
インプラントアナログ	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000081
ボールアタッチメント用ラボアナログ	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000090
印象用キャップ-ログフィット	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000092
インプラントアナログ-ログフィット	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000093
鋳造用キャップ-ログフィット	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000094
ロケーターアナログ	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000095
スキャンボディ	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000109
モデリングエイド	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000110
ロケーター印象キャップ	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000117
COMFOUR 技工用器材	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000155
COMFOUR 補綴器具	医療機器届出番号【一般】	27B1X00027000156

製造販売業者 株式会社アルタデント

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-31 第三東洋ビル2F TEL 06-6377-2221 FAX 06-6377-2223
 東京支社 〒106-0047 東京都港区南麻布2-14-19 オキノビル3F TEL 03-5420-2290 FAX 03-5420-4790
 製造業者 ALTATEC GmbH Maybachstr 5,71229 Wimsheim,Germany

IN.0015.202207.01

camlog
ALTA DENT アルタデント
 株式会社
www.alta-dent.com