

トルク値を目視しながらインプラント埋入

camlog

新型

トルクラチェット 10-70 Ncm

POINT

01

希望のトルク値で
使用可能に
用途により使い分け

POINT

03

分解パーツが少ないため
メンテナンスが
簡便に

POINT

02

IN・OUT(正・逆回転)
が簡単に変換でき
作業効率UP



トルク値を
目視できる



商品コード:J5320.1070
標準価格:¥30,000(税別)



Video Animation

■ インプラント埋入時 使用方法と注意点

① 装着

埋入ツールにトルクラチェット
を装着します。



② 締付方向の確認

矢印が時計回り方向を指していることを確認します。



正回転⇔逆回転は、トルクラチェット後部の矢印部分を回転させることで
セットできます。

③ インプラント埋入

Aの部分を上から指で押さ
えてトルクラチェットを動
かします。



④ トルクを掛ける

レバーアームに力を加えることによりトルク値を計測できます。




カムログインプラントシステム
の推奨埋入トルクは、30 ~
40Ncmです。

⑤ メンテナンス

の部分には、ハンドピースオイルかスプレーを塗布してください。

使用後は、必ず分解して清掃・滅菌してください。

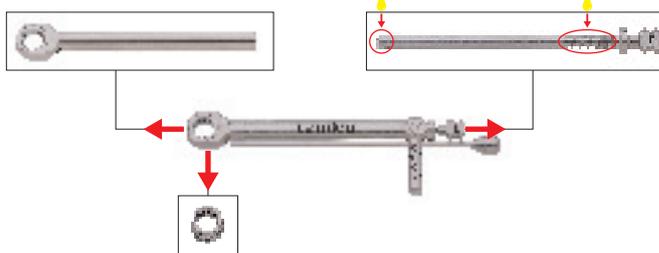

アパットメントやジンジバフォーマー、スクリューの締め付けトルクについては、規定値でご使用ください。