

トルク値を目視しながらインプラント埋入

新型

# トルクラチェット 10-70 Ncm

POINT  
**01**

希望のトルク値で  
使用可能に  
用途により使い分け

POINT  
**02**

IN・OUT(正・逆回転)  
が簡単に変換でき  
作業効率UP

POINT  
**03**

分解パーツが少ないため  
メンテナンスが  
簡便に



トルク値を  
目視できる



商品コードJ5320.1070  
標準価格: ¥30,000(税別)



Video Animation

## ■ インプラント埋入時 使用方法と注意点

### ① 装着

埋入ツールにトルクラチェット  
を装着します。



### ② 締付方向の確認

矢印が時計回り方向を指していることを確認します。



正回転⇔逆回転は、トルクラチェット後部の矢印部分を回転させることで  
セットできます。

### ③ インプラント埋入

Aの部分を上から指で押さ  
えてトルクラチェットを動  
かします。



### ④ トルクを掛ける

レバーアームに力を加えることによりトルク値を計測できます。




カムログインプラントシステム  
の推奨埋入トルクは、30 ~  
40Ncmです。

### ⑤ メンテナンス

の部分には、ハンドピースオイルかスプレーを塗布してください。

使用後は、必ず分解して清掃・滅菌してください。

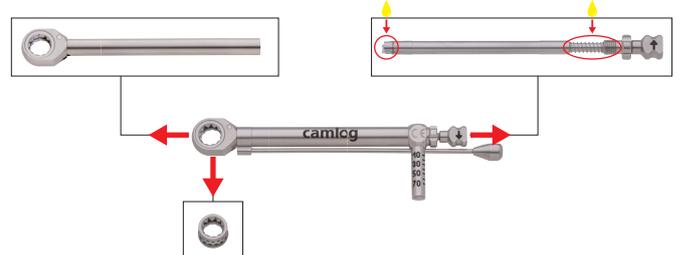

アバットメントやジンジバフォーマー、スクリューの締め付けトルクについては、規定値でご使用ください。

# トルクラチェットキャンペーン

<p>キャンペーン 番号 <b>1</b></p>	<p>インプラント5本 + トルクラチェット 10-70 Ncm</p>	 <p>トルクラチェット 10-70 Ncm 商品コード: J5320.1070 標準価格: ¥30,000(税別)</p>	<p>30,000円お得!</p> <p>キャンペーン特別価格</p> <p><b>160,000円</b> (税別)</p>
<p>キャンペーン 番号 <b>2</b></p>	<p>インプラント3本 + ジンジバフォーマーいずれか1本</p>	 <p>ジンジバフォーマー 商品コード: C/J2015.xxxx C/J2014.xxxx C/J2011.xxxx J2024.xxxx K2005.xxxx K2004.xxxx K2001.xxxx 標準価格: 各¥5,000(税別)</p>	<p>5,000円お得!</p> <p>キャンペーン特別価格</p> <p><b>96,000円</b> (税別)</p>
<p>キャンペーン 番号 <b>3</b></p>	<p>インプラント5本 + ジンジバフォーマーいずれか2本</p>	 <p>ジンジバフォーマー 商品コード: C/J2015.xxxx C/J2014.xxxx C/J2011.xxxx J2024.xxxx K2005.xxxx K2004.xxxx K2001.xxxx 標準価格: 各¥5,000(税別)</p>	<p>10,000円お得!</p> <p>キャンペーン特別価格</p> <p><b>160,000円</b> (税別)</p>
<p>キャンペーン 番号 <b>4</b></p>	<p>インプラント3本 + ジンジバハイトインジケータいずれか1本</p>	 <p>ジンジバハイトインジケータ 商品コード: J3550.XXXX 標準価格: 各¥9,000(税別)</p> <p>フィクスチャに接続して歯肉の高さを計測し、アバットメントのサイズを選択する際の目安として用います。</p>	<p>9,000円お得!</p> <p>キャンペーン特別価格</p> <p><b>96,000円</b> (税別)</p>
<p>キャンペーン 番号 <b>5</b></p>	<p>インプラント5本 + ジンジバハイトインジケータいずれか2本</p>	 <p>ジンジバハイトインジケータ 商品コード: J3550.XXXX 標準価格: 各¥9,000(税別)</p> <p>フィクスチャに接続して歯肉の高さを計測し、アバットメントのサイズを選択する際の目安として用います。</p>	<p>18,000円お得!</p> <p>キャンペーン特別価格</p> <p><b>160,000円</b> (税別)</p>

カムログアバットメント 医療機器承認番号【高度】 212008ZY00583000  
カムログインプラント K-シリーズ 医療機器承認番号【高度】 222008ZX00868000  
コーンログインプラントシステム 医療機器承認番号【高度】 229008ZX00154000  
カムログ ジンジバフォーマー 医療機器承認番号【高度】 306008ZX00017000  
カムログ インプラント補綴用器具 医療機器承認番号【一般】 27B1X00027000026  
カムログ レンチ 医療機器承認番号【一般】 27B1X00027000005

キャンペーン期間 **2025年8月31日(日)受付分まで**

新製品トルクラチェット 10-70 Ncmの詳細は裏面をご覧ください ▶

オーダーシート

FAX. 06-6377-2223

貴院名	Email	
〒□□□ - □□□□	都道府県	市区町村
送付先	以下の住所	
ビル名等	TEL ( ) -	

インプラント体はご注文を受付次第発送いたします。なお、納期の指定には対応いたしかねますのでご注意ください。インプラント体の交換は、未開封、出荷時と同じ状態でご購入日より1年以内の商品に限り対応いたします。詳しくは弊社営業スタッフまでお問い合わせください。※ご記入いただいたメールアドレスなどの個人情報は厳正な管理の上、今後のセミナー案内・弊社製品案内等のメールマガジンの配信に使用させていただきます。

ご希望のキャンペーン内容を選択し、商品コード/数量をご記入ください。	1	2	3	4	5
商品コード	数量	商品コード	数量		
例) K1046.3813	1				

- カムログ
- [K1045] スクリューインプラント プロモート (スクリューマウント)
  - [K1046] スクリューインプラント プロモート (スナップマウント)
  - [K1055] スクリューインプラント プロモートプラス (スクリューマウント)
  - [K1056] スクリューインプラント プロモートプラス (スナップマウント)
  - [K1075] プログレッシブライン (スクリューマウント)
  - [K1076] プログレッシブライン (スナップマウント)
- コーンログ
- [C1065] コーンログ スクリューライン (スクリューマウント)
  - [C1066] コーンログ スクリューライン (スナップマウント)
  - [C1085] プログレッシブライン (スクリューマウント)
  - [C1086] プログレッシブライン (スナップマウント)