

## トルクラチェット (J5320.1030)



### 【トルクラチェット組み立ての手順】




#### ラチェットギアの着脱:

親指と人差し指でラチェット両側のつまみ(※1)を矢印(※2)の方向へ引きながらラチェットギアを上から着脱します。その際、ラチェットヘッドのINの表記が上になるよう注意してください。

#### メンテナンス

- ・使用後のトルクラチェットは必ず分解してください。
- ・分解した各部品は流水下でナイロンブラシ等で洗浄します。
- ・回転器具用の消毒、洗浄溶液に入れます。  
— この時、洗浄液メーカーの手引きを遵守してください!!! —
- ・十分に乾燥させます。
- ・▲印の部分にはハンドピースオイルかスプレーを塗布してください。
- ・【トルクラチェットの組み立ての手順】の通りに再度組み立てます。
- ・外科処置に使用する前は、必ずオートクレーブで滅菌してください。

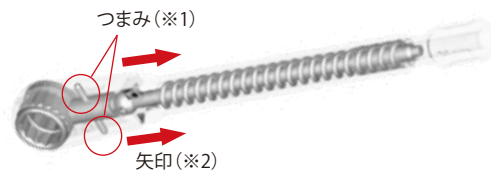


#### 外科:

##### トルク設定機能の解除 (インプラント埋入時)

- 1) トルク調整つまみを緩める
- 2) ラチェットハンドルを矢印の方向に引っ張る
- 3) ハンドル部を90°回す
- 4) ハンドルをラチェットヘッド方向にはめこむ
- 5) トルク調整つまみを時計方向に回してハンドルを固定する

#### 補綴:

##### トルク設定機能を使用

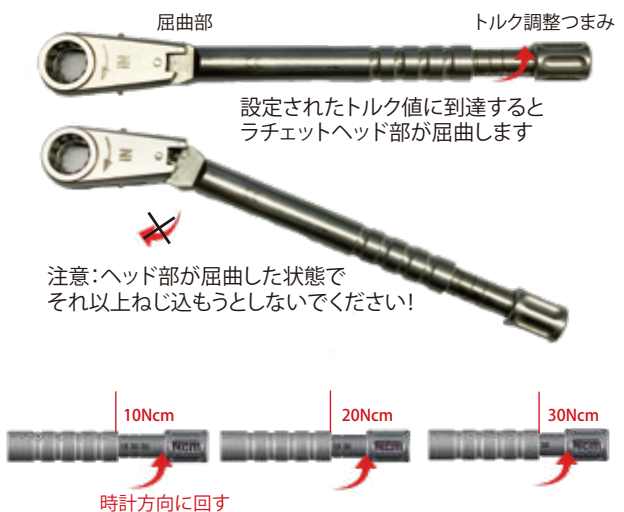

#### ツールの着脱

- ・埋入ツール
- ・HEXスクリュードライバー 等

##### 1) 取り付け



トルクラチェットのINを上にしてツールの矢印の方向からしっかり押し込みます。

##### 2) 使用時



ヘックススクリュードライバーの上端を指で押さえて安定させます。

##### 3) 取り外し



押し込みます。

カムログ レンチ 医療機器届出番号【一般】27B1X00027000005